

forma2
STRETCH



Zweiteiliges Kompressionssystem

Das Mehrlagen-Kompressionssystem Forma2 stretch wurde für die Langzeitbehandlung in der Kompressionstherapie von Venenerkrankungen und Ödemen mit anderen Ursachen entwickelt und besteht aus einer weißen Polsterbinde und einer braunen kohäsiven Kompressionsbinde mit Indikatordruck.


Durch Anlegen der beiden Bandagen im Lagenverband bilden diese ein Kompressionssystem, das je nach Zustand der Wunde und Tragezeit des verwendeten Wundverbandes, bis zu 7 Tage getragen werden kann.

Die erste Lage besteht aus einer weißen Polsterbinde, die auf einer Seite mit einer kohäsiven Beschichtung versehen ist. Die zweite Lage ist eine braune Kompressionsbinde aus Polypropylen und Elasthan mit beidseitiger, kohäsiver Beschichtung und einem aufgedruckten Indikatordruck. Beide Binden sind ohne Naturkautschuk hergestellt.

Aufgrund seiner Kurzzug-Eigenschaften weist Forma 2 stretch einen hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck (bei mobilen Patienten) aus. Dadurch können Ödeme reduziert werden.



Hautfreundlich

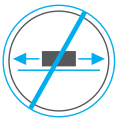

Rutschfest



Luftdurchlässig



CE

Besonders anwenderfreundlich

Indikator als Hilfe für die korrekte Anlage der braunen kohäsiven Kompressionsbinde. Bei Dehnung der Binde ändert sich die Form des Indikators. Wenn das Indikatorbild kein Quadrat mehr ist, hat die Binde nicht mehr die korrekte Dehnung für den erforderlichen Kompressionsdruck.

Der Kompressions-Verband kann entweder durch Abwickeln der beiden Binden oder Aufschneiden mit einer Verbandschere abgenommen werden. Das Mehrlagen-Kompressionssystem forma2 stretch darf nur auf intakter Haut angewendet werden.

1. Polsterbinde

(Kurzzug, 10 cm x 6,5 m*)
einseitig kohäsiv beschichtet



2. Kompressionsbinde

Mit Indikatoraufdruck
(Langzug 10 cm x 8,2 m*)
beidseitig kohäsiv beschichtet
Material: ca. 85% Polypropylen, 15% Elasthan



*gedehnte Länge

- Wirkungsvolle Kompression
- Einfache Handhabung
- Mit Indikator als Applikationshilfe
- Abreißbar per Hand

Forma2 stretch

Inhalt: 1 Set bestehend aus 2 Binden

Art.Nr. F2ST02 PZN - 17174566



Ihr Vertriebspartner in Deutschland